

## FIRIN PROGRAMI

		Marjin Porselen 1-2 Pişim	Shade Base 1-2 Pişim	Dentin ve Şeffaf	İç Makyaj 1-2 Pişim	Ufak Düzeltmeler ve Transparant	Natürel Glazür (Self Glaze)	Glazür ve Dış Makyaj	Düşük Isı Tamir
Kurutma Süresi	dak.	5	5	7	5	7	5	5	5
Düşük Isı	C°	600	600	600	600	600	600	600	600
Vakum Başlama Isısı	C°	600	600	600	-	600	-	-	-
Dakikadaki Isı Artışı	C°/dak	50	45	45	55	45	50	50	45
Vakum Seviyesi	cmHg *1	72	72	72	0	72	0	0	0
Vakum Bırakma Isısı	C°	1030	960	960	-	960	-	-	-
Yüksek Isıda Bekleme Süresi	vakumlu	dak.	1	-	1	-	-	-	-
	vakumsuz	dak.	1	1	1	-	1	0,5	-
En Yüksek Isı	C°	1030	960	960	920	960	960	960	900
Soğutma Süresi	dak.	4	4	4	4	4	4	4	4



### NOTLAR

Yukarıdaki program sadece rehber olarak verilmiştir. Fırınlama sıcaklıkları farklı fırın çeşitlerine ve kalibrasyona göre değişebilir.

\*1 72cmhg= 96 kPa (29 inchesHg)