

FIRIN PROGRAMI

		Marjin Porselen 1-2 Pişim	Shade Base 1-2 Pişim	Dentin ve Şeffaf *2	İç Makyaj 1-2 Pişim	Ufak Düzeltmeler	Natürel Glazür (Self Glaze)	Glazür ve Dış Makyaj	Düşük Isı Tamir
Kurutma Süresi	dak.	5	5	7-10	5	7	5	5	5
Düşük Isı	c°	600	600	600	600	600	600	600	600
Vakum Başlama Isısı	c°	600	600	600	-	600	-	-	-
Dakikadaki Isı Artışı	c°/dak	50	45	45	50	45	50	50	45
Vakum Seviyesi	cmHg *1	72	72	72	0	72	0	0	0
Vakum Bırakma Isısı	c°	1000	930	930-940	-	930	-	-	-
Yüksek Isıda Bekleme Süresi	vakumlu	dak.	1	-	-	-	-	-	-
	vakumsuz	dak.	1	1	1	-	0,5	0,5	-
En Yüksek Isı	c°	1000	930	930-940	900	930	930	930	880
Soğutma Süresi	dak.	4	4	4	4	4	4	4	4



NOTLAR

Yukarıdaki program sadece rehber olarak verilmiştir. Fırınlama sıcaklıkları farklı fırın çeşitlerine ve kalibrasyona göre değişebilir.

*1 72cmhg= 96 kPa (29 inchesHg)

*2 Çok üye pişimlerinde yüksek ısıyı ve kurutma zamanını arttırın.