

Olası Problemler ve Çözüm Önerileri

Mat Görüntü

I- Glazür işlemi sonrasında yeterli transparan görüntünün olmaması

Neden 1 : Yüksek ısı (sıcaklık) yeterince çok düşük

- 1. Pişim sonrasında yüzeyin hafifçe parlak olacağı şekilde yüksek sıcaklık ayarlanır.

Neden (2) : Düşük sıcaklık çok yüksek

- Tavsiye edilen fırın programını tam olarak uygulayınız.

Neden (3) : Farklı firmaların Forming Likitlerinin kullanılması

- Noritake Forming Likit kullanın, diğer firmaların Forming likitleri çok fazla organik component içerir.

Neden (4) : Vakum pompası uygun olarak çalışmıyor

- 60 saniye içinde vakum seviyesi 72mm (28.4 in) ulaşmıyorsa, pompayı mutlaka tamir ettiriniz.

Neden (5) : Kirli temizlik solüsyonunun porselen

- Ultrasonik temizlikte mutlaka temiz temizleme solüsyonu kullanınız.

Neden (6) : En üst tabakası aşırı kurumuş porselen yüzeyine, ıslat porselen uygulanması, porselene tam kaynaşmayı engeller.

- Porselen yükleme işlemi boyunca, nem kontrolü dikkatlice yapılmalıdır.