

Olası Problemler ve Çözüm Önerileri

Renk (Ton)

I- Renk (ton) açık. Dentin ve Şeffaf pişiminden sonra çok fazla transparan görüntü oluyor.

Neden (1) : Dentin ve Şeffaf dengesi uygun değil.

- Değer Dentin kalınlığı 0.8 mm'den düşük ise, 0.2 mm Opak Dentin, dentin tonu altında kullan.
- Eğer porselen için yeterli alan yok ise insizal alanda sadece transpa kullan.
- Eğer Dentin yeterli değilse ve Şeffaf ve transpa gereğinden fazla olabilir. Daha fazla Dentin daha az Şeffaf kullan.

II- Insizal alanda renk çok koyu

- Bir ton düşük Enamel ile karıştırarak kullan

III- Vita Lumin renk Skalası ile karşılaştırıldığında, renk tonu kırmızı yönde

- Kron takıldığı zaman, hastanın diş eti rengi krondaki kırmızılığı emer (absorbe eder)

Eğer kron renk skalası ile birebir aynı ise, kron rengi daha koyu yönde doğru kayar. Özellikle yüksek doygunluktaki (kroma) renklerde A4, A3.5 gibi bu problem görülür.

IV- Glazürden sonra renk tonunun çok koyu ve gri yönde olması

Neden (1) : Metal rengi opak ile tam olarak kapatılmamış ise

- Opak aşamasında çok dikkatli olunmalıdır
- Dentin porselen kalınlığı en az 0.8 mm olmalıdır.
- Eğer 3 katlı sistem uygulanacaksa, 2 katlı yükleme sisteminden daha fazla dentin porselen ile 0.8 mm kalınlığa ulaşmaya çalışın.
- 1 ton daha açık şeffaf kullanın yada en azından karışım yapın
örneğin E3 yerine 1 kısım E1 ve E2 karışımı kullanımı gibi.