

Dentin Dokusundan Esinlenilerek Yaratıldı – KATANA™ ZIRCONIA ML

Polikromatik & Yüksek-transludent


CAD/CAM ile zirkonya işlemenin güzelliği ekonomi, hız ve hassasiyete dayalıdır. Peki zirkonyadan dentin-benzeri konstrüksiyonlar mı? Evet. KATANA™ Zirkonya ML ışık ile doğal opaklığı yansıtın.

En üsteki kaplama seramiği en doğal sonucu elde eder. Bu Zirkonya doğal renk değişimi ile verilir. Bir sonraki vakanızda konstrüksiyonunuzu porselen ile bitirmeyi düşündüğünüzde dentin-benzeri altyapı olarak KATANA™ Zirkonya ML kullanmayı düşünün.

KATANA™ Zirkonya ML üzerine Kuraray-Noritake'nin CERABIEN™ ZR grubu porseleni uygulandığında üstün bir bonding ve mekanik performans ortaya çıkmaktadır

NATUREL RENK GRADYANI POLI-KROMATİK YAPI SAYESİNDE MÜMKÜNDÜR (ML/UTML)

Tabakalar: ● dentin 35% ● gradyan tabaka 1 15% ● mine tabakası 35%
● gradyan tabaka 2 15%

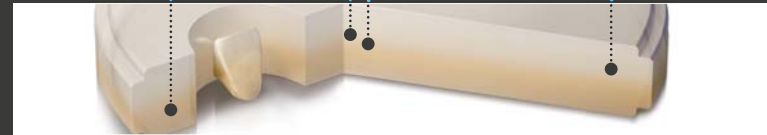

Görsel gerçek üründen farklılık gösterebilir.

TRANSLUSENSİ ¹

31%

ELASTİKİYET DAYANIMI ²

1125 MPa

¹Wavelength of light: 700 nm - sample thickness: 0.5 mm. White zirconia is used as testing material.

Source: Kuraray Noritake Dental

²Three point bending test according to ISO 6872:2008 - sample size 3 x 4 x 40 mm. White zirconia is used as testing material.

Source: Kuraray Noritake Dental

kuraray *Noritake*



Poli-kromatik / Yüksek-transparan Zirkonya Blokları
Posterior Endikasyonlar

KATANA ML	A LIGHT	A DARK	B LIGHT	C LIGHT	D LIGHT	A WHITE
14 mm	#125-2162EU	#125-2192EU	#125-2222EU	#125-2642EU	#125-2672EU	#125-2702EU
18 mm	#125-2173EU	#125-2203EU	#125-2233EU	#125-2653EU	#125-2683EU	#125-2713EU
22 mm	#125-2184EU	#125-2214EU	#125-2244EU	#125-2664EU	#125-2694EU	#125-2724EU

SINTERLEME ADIMLARI


Sinterleme önerileri sadece rehberlik amacıyla verilmiştir. Kullanılan fırına göre özel ayarlamaların yapılması gerekebilir. (PSKD = 1375°C)

SICAKLIK	ISI ARTIŞI	SÜRE
OS ~ 1100°C	9°C/dk.	Ort. 2 saat
1100 ~ 1375°C	4.6°C/dk.	Bekleme 2 saat
1375 ~ 500°C	-4.8°C/dk.	3 saat
500°C ~ OS	Doğal yavaş soğuma	

PORSELEN GRUBU

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Porselen:	CERABIEN™ ZR CZR PRESS LF
Glazür:	CERABIEN™ ZR (FL Glazür) CERABIEN™ ZR (VC Glazür)
Makyaj:	CERABIEN™ ZR (External Makyaj) CERABIEN™ ZR (Internal Makyaj)

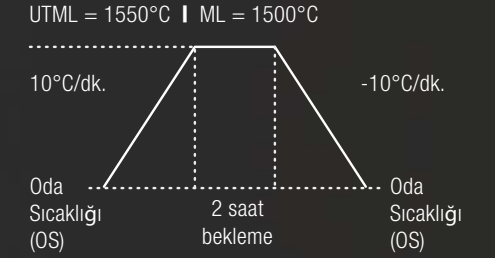

Bu Vakada Kullanılan
Zirkonya CAD/CAM Blok: KATANA™ ML • Porselen: CERABIEN™ ZR

