

## Olası Problemler ve Çözüm Önerileri

### İkinci Pişim

#### I- 2. Pişim sonrasında; 2. Uygulamanın ilkinden ayrılması

Neden (1) : 1. Pişim katının uygun olmaması

- 1. Pişim sonrasında uygulamalar arasında alüminyum oksit ile hafif bir kumlama yapılmalıdır.
- 1. Pişim sonrasında uygulamalar arası aseton yada alkol ile ultrasonik temizlik yapılmalıdır.

Neden (2) : 2. Pişimde yetersiz fırınlama süresi ve/yada çok uzun kondensasyon (yoğunlaşma)

- Porselenin hafif ıslak bırakınız ve ek pişimlerde minimum 7 dakika fırınlama süresi veriniz.
- 2. pişimde yüksek ısı yeterli değil.
- Sıcaklık .1 fırınlama ile aynı olmalı.

#### II- 1. Pişim sonrasında dentin'nin opak katından ayrılması

Neden (1) : 2. Opak tabakası için pişim ısı çok yüksek (yüzey çok parlak)

- Dentin porselen uygulaması öncesinde Opak yüzeyi alüminyum oksit ile hafifçe kumlanmalıdır.

Neden (2) : Dentin ve Opak porselen arasındaki boşlukta (aralıkta), dentin porselenin aşırı kondense olması sonucu.

- Kondensasyonu aşırı nem uzaklaştığı anda durdurmak gerekir.

#### III- Marjinde metal siyah hattı görülmesi

Neden (1) : Opak porselenin marjin boyunca çekmesi

- Marjin boyunca opak porselen uygula.
- 2. Opak uygulamasından önce wash bake için suyla yüzeyi ıslat.