

Olası Problemler ve Çözüm Önerileri

Marjin Porselen

I- Glazür işleminden sonra marjin artık uygun değil

- Bu aşamada MRP kullan. 850°C yüksek sıcaklıkta vakumsuz olarak ısıt.

II- Glazür işleminden sonra marjin artık uygun değil. Sadece MRP kullanarak renk tonu ayarlanamıyor (kontrol edilemiyor)

- Uygun renkte marjin porseleni ile MRP 1:1 oranında karıştırılarak kullanılır. 900°C yüksek ısıda vakumsuz olarak fırınlanır.

III- Marjin porselen bölgesinde idealden daha koyu görüntü oluşması

Neden (1) : Çok fazla Marjin porselen uygulanmıştır.

- Labial/buccal köşelerden hiç kalınlık vermeden marjin porseleni uygula. Marjin porselene keserek (küçülterek) 45 derece den düşük üçgen şeklinde labial/buccal açığı ver.

I- Marjin porselen uygulaması tamamlandıktan sonra, parça (unit) modelden çıkarıldığı zaman bir parça marjin porselen modele yapışıyor

- Noritake Stone Hardner kullanarak öncelikle model yüzeyine kimyasal işlem yapılır. Daha sonra Magic Seperator uygulanır.